

HANAULUX

Frankfurt / Wien

Ersatzteilliste


Spare Parts List




Art. Nr. 4300 - 4320	Ausgabe	Issue	03.96
Cat. No. 4300 - 4320	Ersetzt Ausgabe	Replace issue	04.92


Inhaltsverzeichnis	Table of Contents	Seite / Page
Leuchtenkörper, komplett	Light head, complete	1
Reflektor, Frankfurt	Reflector, Frankfurt	2
Reflektor, Wien	Reflector, Wien	3
Aufhängung	Suspension	4
Deckenflansch	Ceiling flange	5
Schaltplan, Frankfurt	Circuit diagramm, Frankfurt	6
Schaltplan, Wien	Circuit diagramm, Wien	7
Art.-Nr. und Bezeichnung	Part No. and description	8 / 9

Technische Daten	Technical Data	Größe / Value
Leistung gesamt	Total rating	250 Watt
Halogenlampe	Halogen bulb	22,8 V / 50 W
Mittlere Lebensdauer der Halogenlampe	Average Lifetime of halogen bulb	1000 h
Mittlere Lebensdauer der Glühlampe	Average Lifetime of bulb	—500 h— 250 h
Gewicht der Leuchte ohne Flanschrohr	Weight of the light without flange tube	46 kg
Farbe Leuchtenunterteil	Colour of light head bottom	RAL 9002 WS
Farbe Leuchtenoberteil	Colour of light head top	RAL 6021 GN

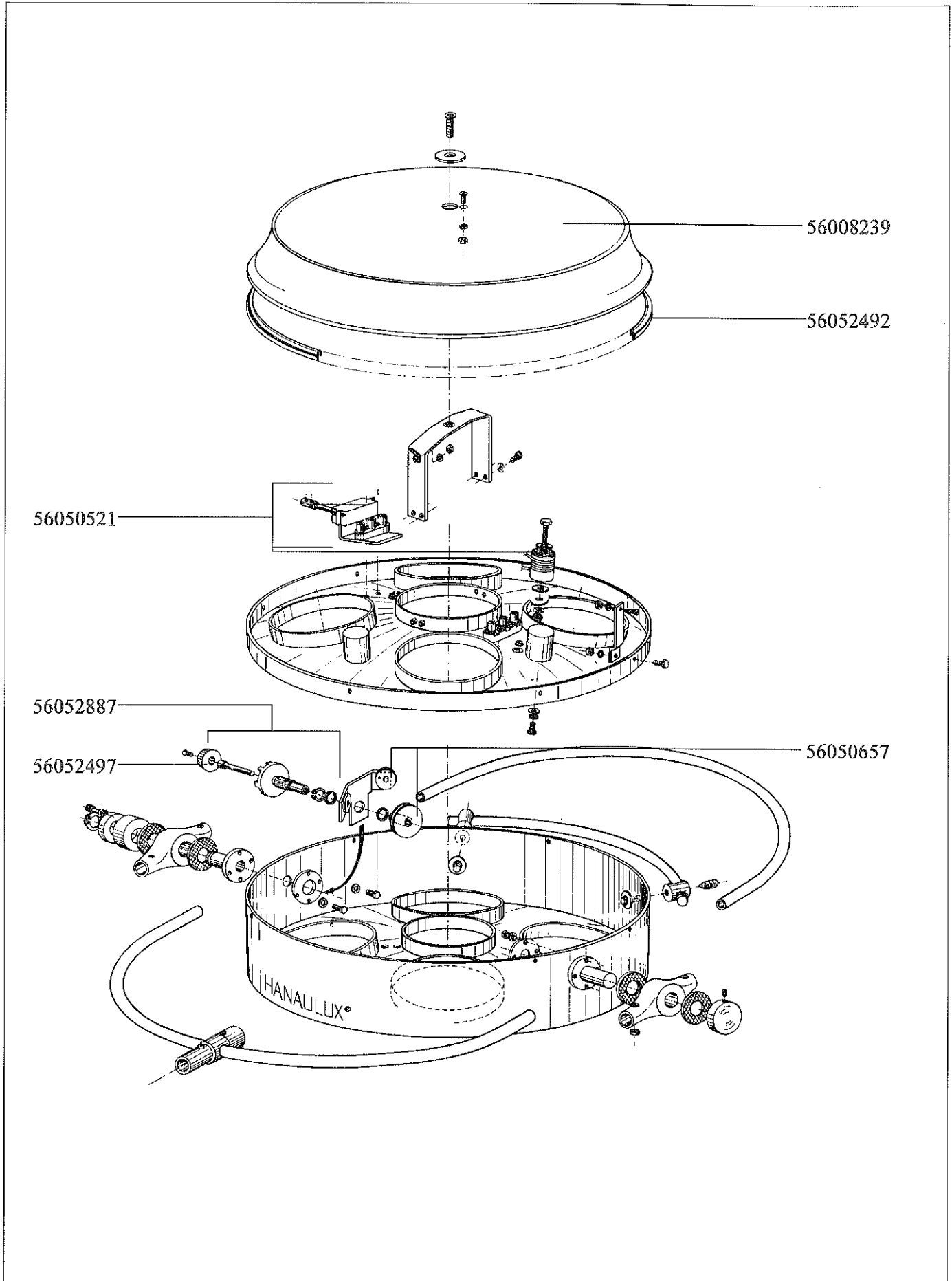

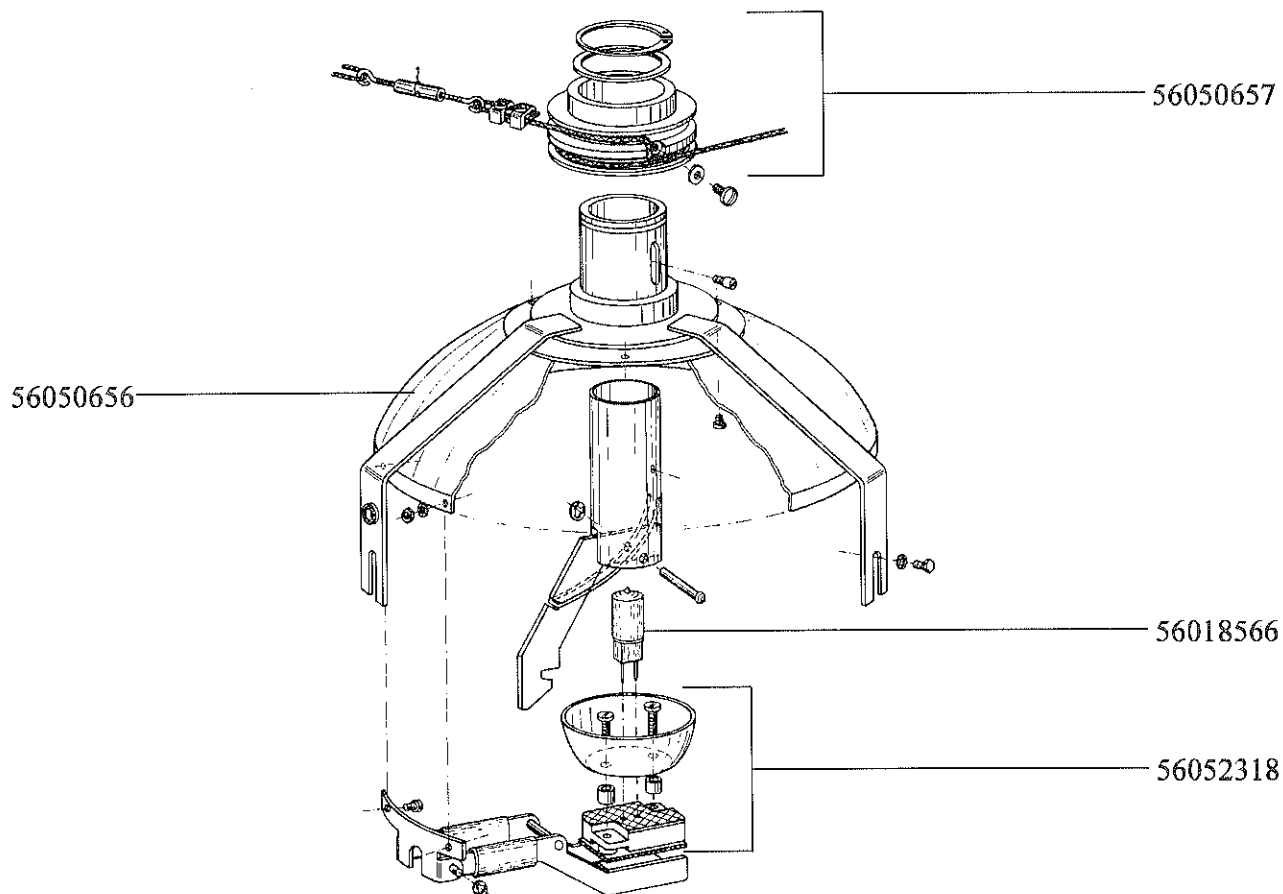


56050434
(außen/outer)
56050348
(mitte/middle)

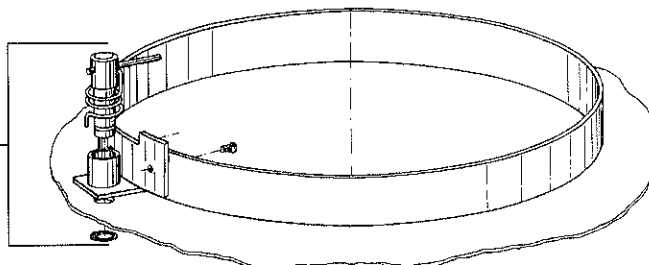

56050637
(Satz für Mitte
und Außen/
set for middle
and outer reflector)

56052619
(außen/outer)
56052620
(mitte/middle)

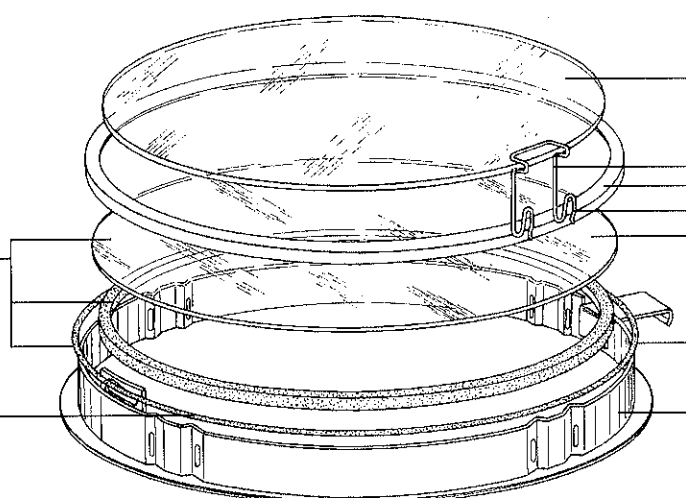


56052322
(außen/outer)
56052481
(mitte/middle)


56050646


56050472
(außen/outer)
56050473
(mitte/middle)

56014507


56014506

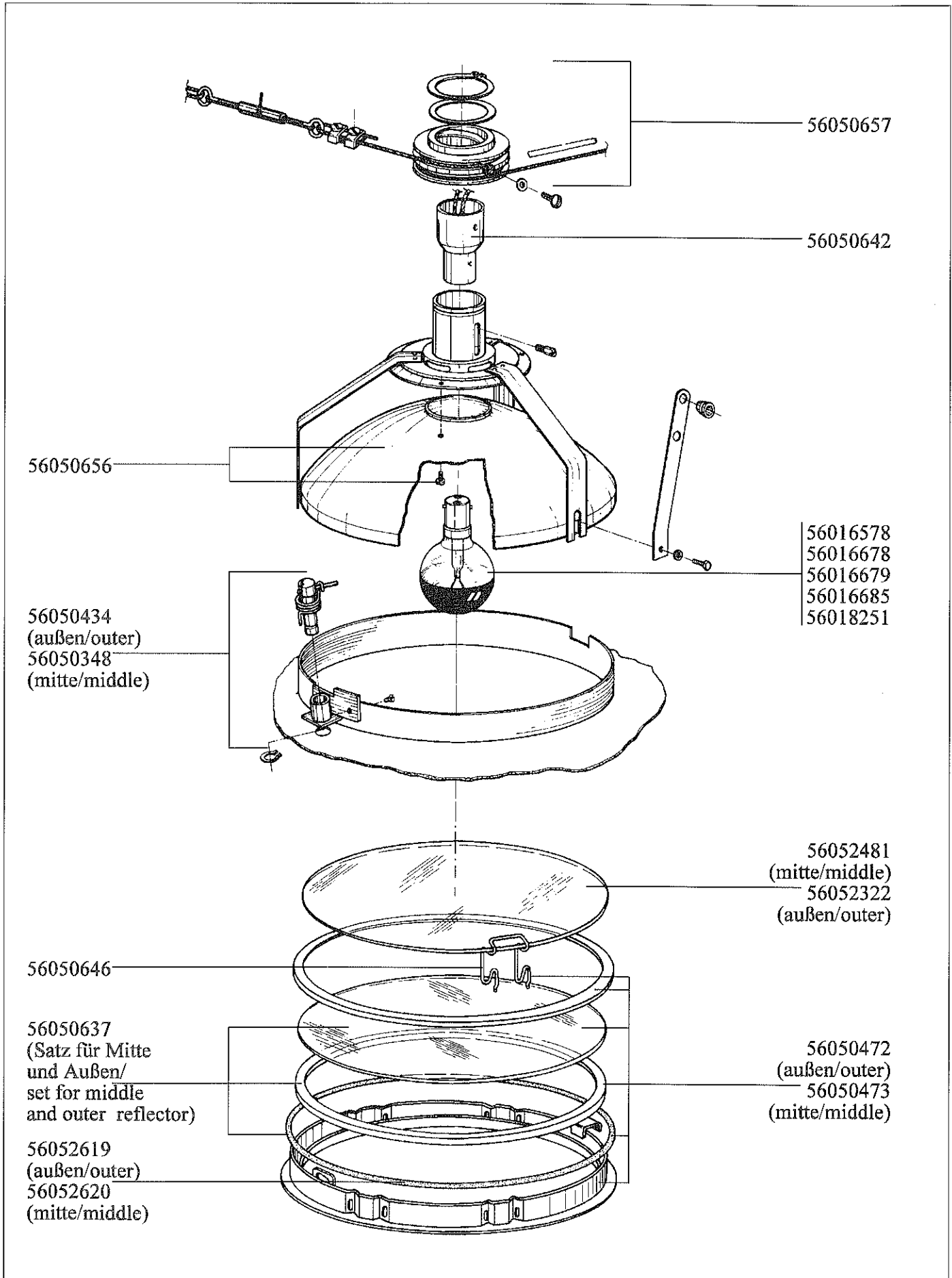

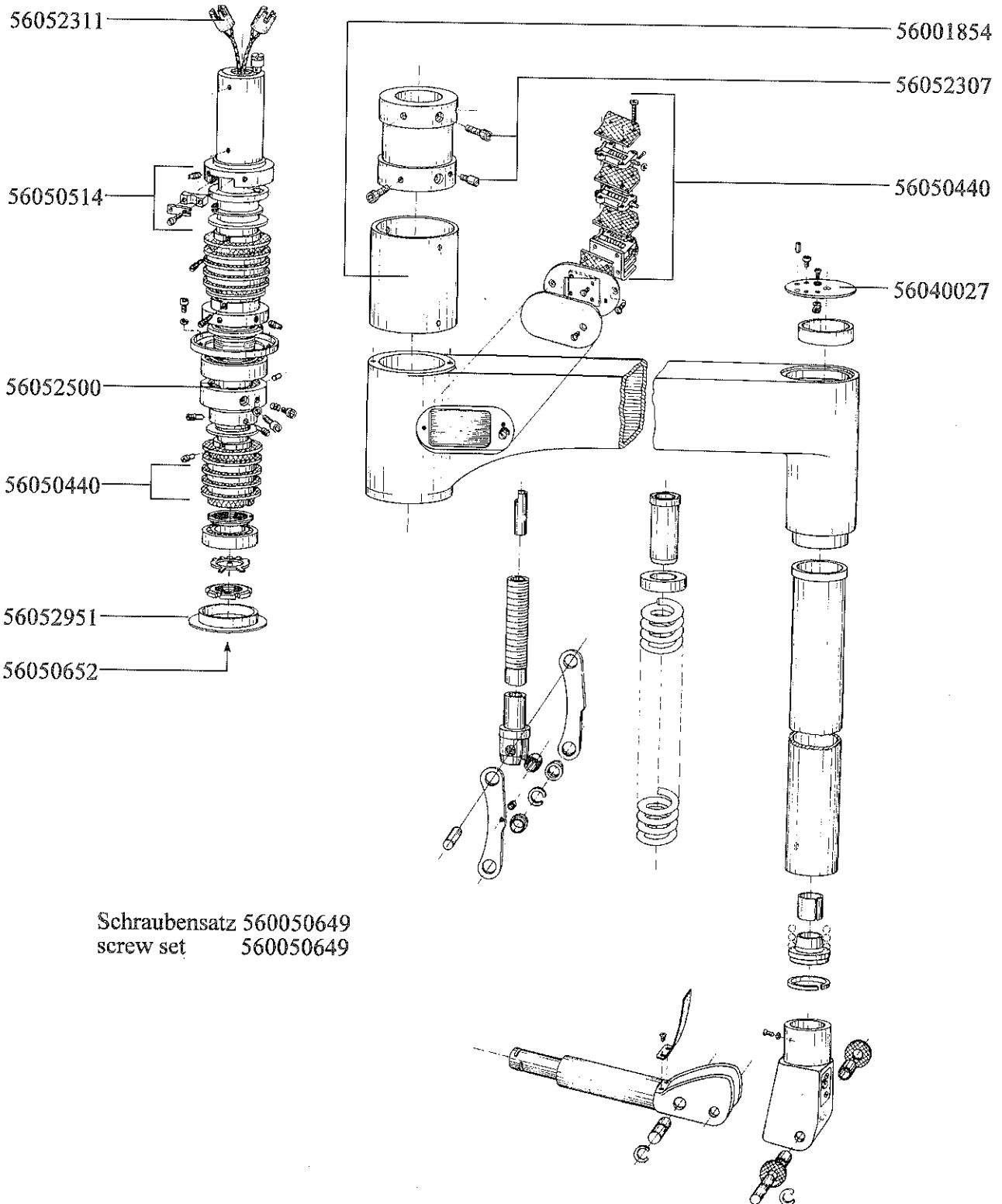

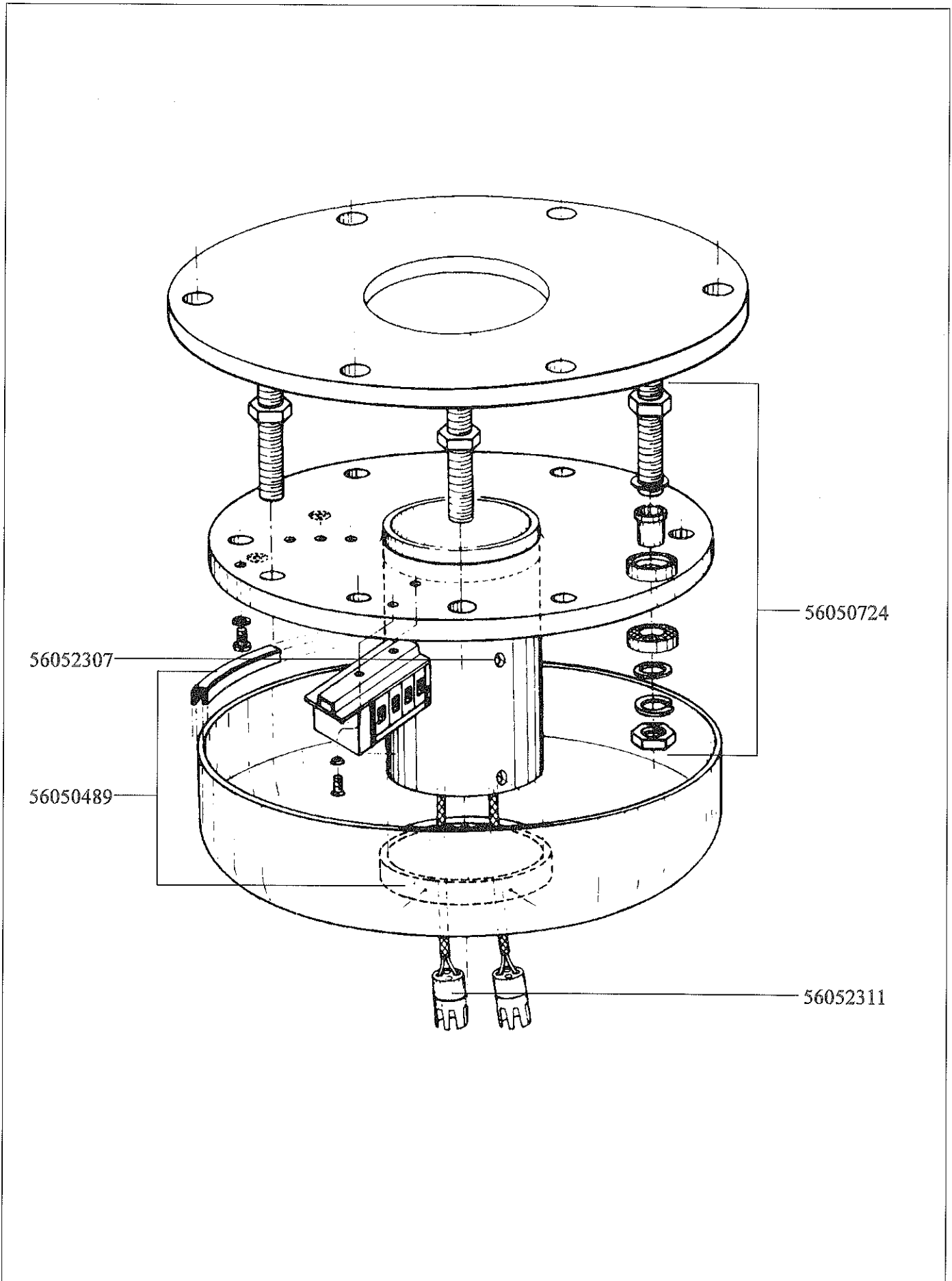

Schaltplan Frankfurt - Circuit diagram Frankfurt

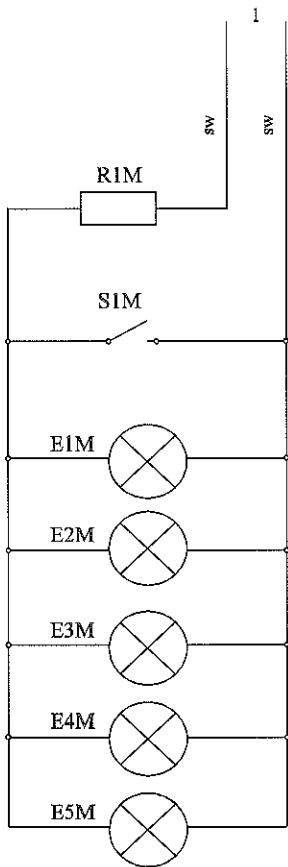


sw = schwarz/black
gng = grün/green-yellow

Anschluß für Satellit
Connection for satellite

- | | |
|---------|---------------------------------------|
| E1M-E5M | Halogenlampe 22,8V 50W - halogen lamp |
| S1M | Schalter 2pol.; 10A - turn switch |
| R1M | Widerstand 0,45Ω - resistor |

Verdrahtungsplan Leuchtenkörper - Wiring diagram lamp head

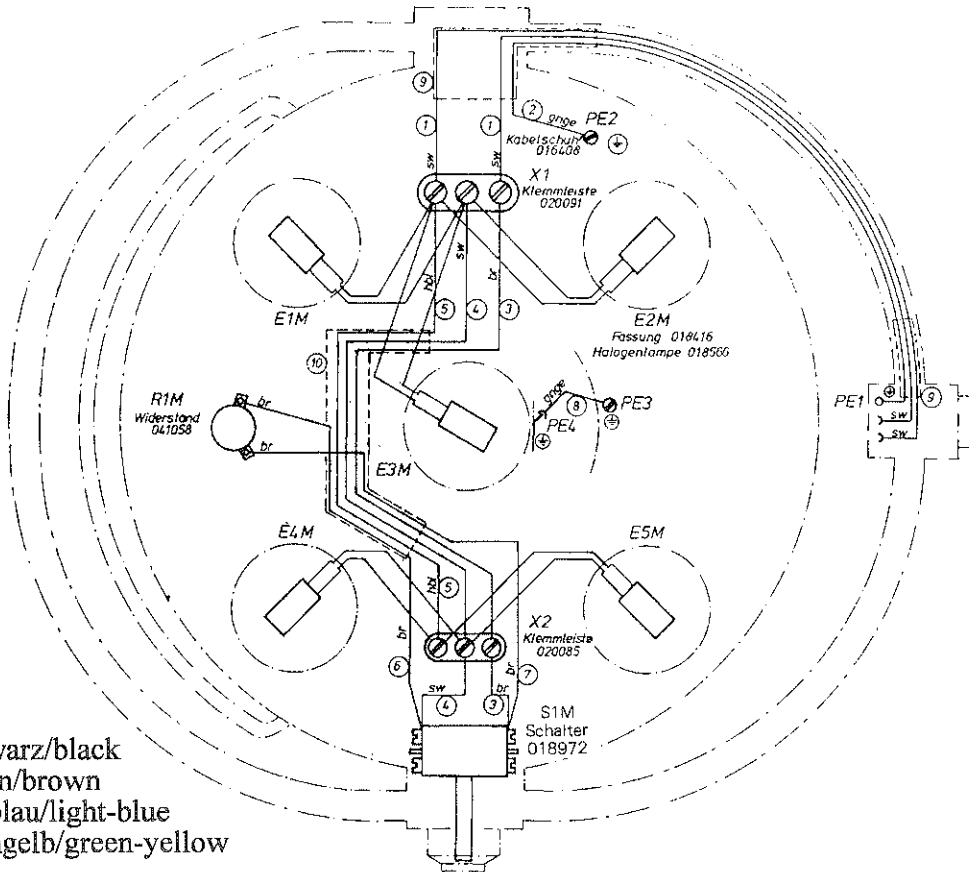

sw = schwarz/black
br = braun/brown
hbl = hellblau/light-blue
gng = grün/green-yellow

ERSATZTEILISTE		SPARE PARTS LIST		Frankfurt / Wien		
Bestell-Nr.	Anz.	Bezeichnung	Description	Verwendung		
Part No.	Pcs.			Used in		
56001854	1	Abdeckrohr für Zentralachse, vollst.	Cover tube for central axle, complete	*	D	E
56008239	1	Leuchtenkörper Oberteil	Top of light head	*	D	E
56016578	1	Glühlampe 125 V, 50 W	Bulb 125 V, 50 W	*	D	
56016678	1	Glühlampe 24 V, 50 W	Bulb 24 V, 50 W		D	
56016679	1	Glühlampe 110 V, 50 W	Bulb 110 V, 50 W	*	D	
56016685	1	Glühlampe 50 V, 50 W	Bulb 50 V, 50 W	*	D	
56018251	1	Glühlampe 220/230 V, 50 W	Bulb 220/230 V, 50 W	*	D	
56018566	1	Halogenlampe 22,8 V, 50 W	Halogen bulb 22,8 V 50 W			E
56040027	1	Deckel mit Anschlag	Cover with stop		D	E
56050348	1	Verschlußhalter, mitte	Locking piece, middle		D	E
56050434	1	Verschlußhalter, außen	Locking piece, outer		D	E
56050440	1	Schleifringe + Kontakte, Satz	Set of slip rings + contacts		D	E
56050472	1	Filtersatz, weiß, außen	Filter set, white, outer		D	E
56050473	1	Filtersatz, weiß, mitte	Filter set, white, middle		D	E
56050489	1	Klemmring mit Keder	Clamping ring complete with gasket		D	E
56050514	1	Bremse für Zentralachse	Brake for central axle		D	E
56050521	1	Umbausatz Schalter Helligkeitsverstellung	Modifikation set for light intensity controller		D	E
56050637	5	Schutzscheiben mit O-Ringen (4+1)	Protective discs with O-rings (4+1)		D	E
56050642	5+4	Glühlampenfassungen	Bulb sockets		D	
56050646	12	Spannfedern	Tension springs		D	E
56050649	1	Schraubensatz	Screw set		D	E
56050652	1	Zentralachse mit Schleifkontakten, 1 SAT	Central axle with slip ring contacts, 1 SAT		D	E
56050656	5	Reflektoren	Reflectors		D	E
56050657	1	Stahlseil mit Schloß und Seilrollen	Steel cable with lock and pulleys		D	E
56050724	1	Befestigungsteile Flanschrohr, Satz	Set of mounting pieces for flange tube		D	E
56052307	1	Schraubensatz Flanschrohr	Screw set for flange tube		D	E
56052311	2	Kreuzrundstecker	Plug		D	E
56052318	1	Halogenlampenfassung + Gegenreflektor	Socket + counter reflector			E
56052322	1	Wärmeschutzfilter, außen	Heat protection filter, outer		D	E
56052481	1	Wärmeschutzfilter, mitte	Heat protection filter, middle		D	E
56052492	1	Gummikeder Leuchtenkörper	Gasket for Light head		D	E
		D = Wien E = Frankfurt	* nur auf Anfrage * on request only			

Bestell-Nr.	Anz.	Bezeichnung	Description	Verwendung	
Part No.	Pcs.			Used in	
56052497	2	Knopf für Helligkeitsverstellung	Light intensity control button	D	E
56052500	1	Bremsring groß	Brake ring, large	D	E
56052619	1	Satz O-Ringe, außen	Set of O-rings, outer	D	E
56052620	1	Satz O-Ringe, mitte	Set of O-rings, middle	D	E
56052887	1	Helligkeitsreglung Rep.satz	Light intensity control repair kit	D	E
56052951	1	Abschlußdeckel Zentralachse	Cover for central axle	D	E
		D = Wien E = Frankfurt	* nur auf Anfrage * on request only		

Distribué par ALPHACOMED - Tél:+33 442 73 10 89 - Fax:+33 442 73 10 03 - www.alphacommed.com

Distribué par ALPHACOMED - Tél:+33 442 73 10 89 - Fax:+33 442 73 10 03 - www.alphacommed.com

Heraeus
MED

56321032

Heraeus Med GmbH
Heraeusstraße 12-14
D - 63450 Hanau
Tel.: (06181) 35-5311
Fax: (06181) 35-784

Heraeus Med GmbH
P. O. Box 1564
D - 63405 Hanau
Tel.: +49 6181 35-5311
Fax: +49 6181 35-784