

GETINGE

GETINGE GAMME K STERILISATEURS DE TABLE




HIGH-SPEED STERILIZATION™

QUI ALLIE CAPACITÉ ET EFFICACITÉ



Les stérilisateurs Getinge de la gamme K sont des modèles de table exceptionnellement rapides et dotés d'une grande capacité. En fait, un seul stérilisateur fait le travail de deux ! En 25 minutes, vous pouvez stériliser jusqu'à 10 plateaux à l'aide du programme du cycle B. Cela équivaut à 20 plateaux par heure. Et si vous n'avez besoin que d'un programme Flash pour des instruments non emballés, cela ne prend que 9 minutes ! Cela signifie que la rotation des instruments est plus rapide et que le nombre d'instruments nécessaires à votre clinique est réduit de manière considérable.

Les stérilisateurs Getinge de la gamme K disposent de chambres rectangulaires qui utilisent presque toute la totalité du volume lors de la stérilisation des plateaux et des cassettes. Dans une chambre ronde, 25% du volume représente de l'espace perdu. Lorsqu'il s'agit de comparer la capacité en plateaux, le volume en litre n'est pas forcément déterminant.

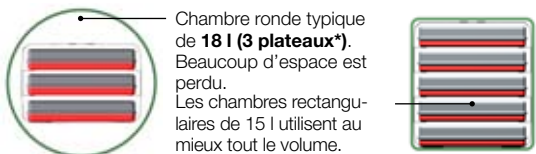

Chambre ronde typique de **18 l (3 plateaux*)**. Beaucoup d'espace est perdu. Les chambres rectangulaires de 15 l utilisent au mieux tout le volume.

Jusqu'à 10 ans de garantie

Nous fabriquons des stérilisateurs depuis plus de 50 ans ; par conséquent, nous connaissons bien les performances remarquables de nos machines. C'est pourquoi Getinge peut proposer des garanties, elles aussi, exceptionnelles : garantie générale de deux ans, garantie de cinq ans sur la pompe du système d'aspiration et garantie de dix ans sur la chambre et les éléments chauffants du générateur de vapeur.



Cycle B éprouvé

La norme EN13060, en application depuis septembre 2004, est la norme européenne pour les petits stérilisateurs, qui exige que ceux-ci puissent stériliser sous vide, selon le procédé B, des instruments creux, emballés et des textiles. Les stérilisateurs Getinge de la gamme K répondent à ces critères depuis 1989.

* Plateau ou cassette dentaire, 38 mm de haut.

Porte coulissante sécurisée

Saviez-vous que les portes de stérilisateurs sont soumises à une pression d'une tonne? Sur les portes de stérilisateurs conventionnelles, cette pression considérable est supportée par des charnières et des verrous. Les stérilisateurs Getinge de la gamme K proposent une solution plus sûre, à savoir une porte coulissante intégrée dans des rails robustes.

Cette conception protège également l'utilisateur de tout contact avec la surface intérieure chaude de la porte et permet de pallier les problèmes d'ouverture de la porte lorsque (comme c'est souvent le cas) l'espace devant le stérilisateur est limité.

Facilité d'emploi et d'entretien

La convivialité et la simplicité de la maintenance sont d'autres avantages importants des stérilisateurs Getinge de la gamme K :

- Simplicité d'utilisation : il suffit de charger le stérilisateur, de fermer la porte et d'appuyer sur le bouton « Marche ».
- Maintenance aisée et peu onéreuse grâce à une conception unique basée sur un nombre limité de composants.
- Réservoir d'eau en acier inoxydable facilement accessible pour le nettoyage, ce qui permet d'éviter toute formation de biofilm non hygiénique.
- Faible consommation d'eau déminéralisée – juste 0,4 litre pour un cycle standard.
- Raccordement simple à l'alimentation en eau.
- Cycle de documentation par l'intermédiaire d'une imprimante, d'une unité de stockage USB ou d'un port série pour PC.

Des modèles adaptés à tous les besoins

Les stérilisateurs Getinge de la gamme K sont répartis en trois modèles dont les profondeurs de chambre et les capacités de chargement diffèrent. Que vous ayez une clinique ou un petit cabinet dentaire, il existe un modèle qui vous convient.

STERILISATEURS GETINGE K5+/K7+ JUSQU'À 20 PLATEAUX & 20 MINI-PLATEAUX PAR HEURE

Programme standard en 25 minutes

Le cycle B ne dure que 25 minutes.

Programme spécial en 15 minutes

Le programme dental special (cycle S) pour 10 pièces à main dentaires emballées s'effectue en 15 minutes.

Programme Flash en 9 minutes

Le programme Flash (cycle N) pour les instruments solides non emballés ne dure que 9 minutes !

Capacité et productivité supérieures

La chambre rectangulaire peut être utilisée de façon optimale pour une capacité de chargement maximale, qui s'avère parfaite pour les plateaux dentaires, les cassettes et autres supports. En une heure, vous pouvez stériliser jusqu'à 20 plateaux d'instruments avec un stérilisateur Geringe K5+. Le stérilisateur Geringe K7+, plus profond de 100 mm, permet de stériliser 20 plateaux d'instruments et 20 mini-plateaux dans le même laps de temps !

Un stérilisateur avec une telle productivité peut faire le travail de deux ! Les instruments sont stérilisés et prêts à l'emploi en un temps très court. Cela signifie que vous avez besoin de moins d'instruments et que vous pouvez diminuer vos investissements, d'où une meilleure rentabilité.

Pour les cabinets de fréquentation moyenne

Les stérilisateur Geringe K5+ et K7+ sont parfaits pour les cabinets/cliniques de fréquentation moyenne avec une utilisation et une rotation d'instruments stérilisables importantes.


La plus grande profondeur de la chambre du stérilisateur Geringe K7+ fait qu'il convient également à ceux qui doivent stériliser des instruments plus longs comme, par exemple, des endoscopes et des instruments spécifiques utilisés pour les implants chirurgicaux.



Les modèles K5+ et K7+ se déclinent en deux versions, avec le nouveau boîtier en acier inoxydable ou avec le boîtier blanc.

Voici ce que le Geringe K5+ peut stériliser en une heure :

20 plateaux

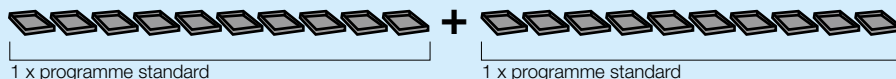


1 x programme standard

1 x programme standard

Voici ce que le Geringe K7+ peut stériliser en une heure :

20 plateaux +
20 miniplateaux

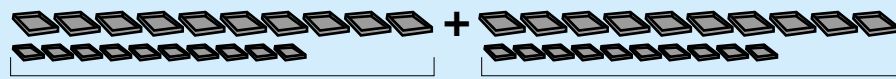

1 x programme standard

1 x programme standard

STERILISATEUR GETINGE K3+

12 PLATEAUX MAXIMUM PAR HEURE

Programme standard en 25 minutes

Le cycle B ne dure que 25 minutes.

Programme spécial en 15 minutes

Le programme dental special (cycle S) pour 10 pièces à main dentaires emballées s'effectue en 15 minutes.

Programme Flash en 9 minutes

Le programme Flash (cycle N) pour les instruments solides non emballés ne dure que 9 minutes !

Capacité et productivité supérieures

La chambre rectangulaire peut être utilisée de façon optimale pour une capacité de chargement maximale, qui s'avère parfaite pour les plateaux dentaires, les cassettes et autres supports. En une heure, vous pouvez stériliser jusqu'à 12 plateaux d'instruments.

Les stérilisateur K3+ offrent une productivité plus élevée par rapport aux stérilisateur conventionnels de la même catégorie. Les instruments sont stérilisés et prêts à l'emploi dans un délai très rapide. Cela signifie que vous avez besoin de moins d'instruments et que vous pouvez diminuer vos investissements, d'où une meilleure rentabilité.

Pour les cabinets de faible fréquentation

Les stérilisateur Getinge K3+ sont parfaits pour les cabinets/cliniques de petite et moyenne fréquentation ayant une rotation d'instruments stérilisables normale et rapide.

La profondeur de la chambre est la même que celle des stérilisateur K5+, mais la hauteur, et par conséquent la capacité, sont légèrement inférieures.




Le modèle K3+ se décline maintenant en deux versions, avec le nouveau boîtier en acier inoxydable ou avec le boîtier blanc.



Getinge K3+
profondeur : 345 mm




Getinge K5+
profondeur : 345 mm

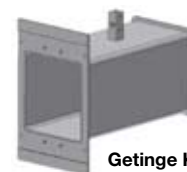

Getinge K7+
profondeur : 445 mm

Voici ce que le Getinge K3+ peut stériliser en une heure :

12 plateaux

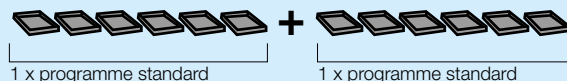


CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

STERILISATEURS GETINGE DE LA GAMME K		
Programmes standard		
Type de procédé	Programmes	Durée du procédé
Cycle B	134°C emballé	~25 min
Cycle B	121°C emballé	~39 min
Cycle B	134°C textile	~29 min
Cycle B	134°C prion	~38 min
Cycle S	134°C dental special*	~15 min
Cycle N	134°C flash	~9 min
Programmes de test : Bowie & Dick, test de fuite		

* Pour 10 pièces à main dentaires emballées maximum.

Programmes optionnels		
Cycle liquide	121°C liquide	~90 min
Défini par client	121°C - 134°C	

La durée des cycles dépend de la charge et est donnée à titre indicatif. Elle correspond à un traitement complet, séchage compris, en charge moyenne. Pour plus de détails, reportez-vous aux spécifications du produit.

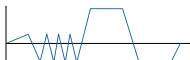

Procédé B (schéma)



Procédé N (schéma)




Procédé S (dental special)

Electricité
monophasé, 230 V, 10 Amp.

Niveau sonore
<60 dB

Validation

Les stérilisateur sont équipés de raccords pour les capteurs de température et de pression externes indépendants pour la validation, conformément à la norme EN554 et ISO17665 par exemple.

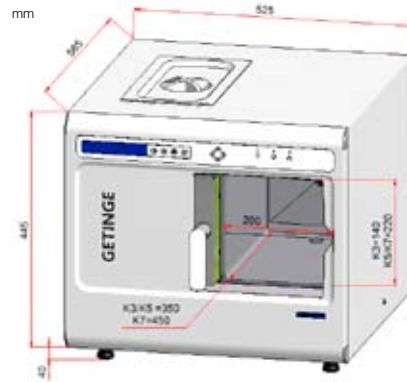

Volume de la chambre : / Charge max. (textiles) :

K3+ = 10 L / 3 kg (1,5 kg)

K5+ = 15 L / 5 kg (2,5 kg)

K7+ = 20 L / 7 kg (3,5 kg)

Raccordements à l'eau et conditions requises

Qualité de l'eau : distillée ou déminéralisée, max. 30 µS/cm

Consommation d'eau : environ 0,4 L/cycle

Volume du réservoir : 5 litres

Pression de l'eau : au moins 1,0 bar lorsque l'appareil est raccordé à l'alimentation en eau

Filtre de déminéralisation DS200

Capacité à 200 ppm : environ 520 litres


Montage mural.

Traçabilité

Par l'intermédiaire d'une imprimante, d'une unité de stockage USB ou d'un port série pour PC.



ACCESSOIRES

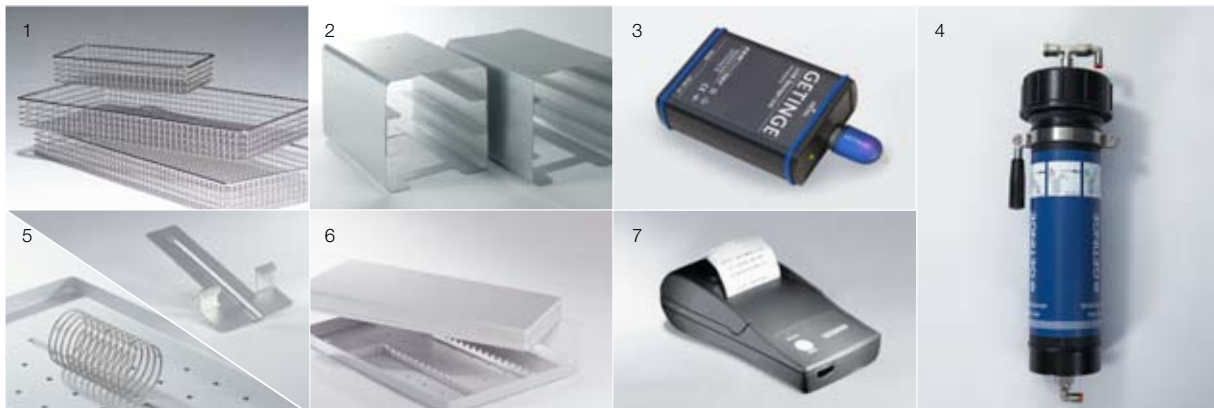

Une sélection d'accessoires pour les stérilisateur Getinge de la gamme K

1. Plateaux, 380x190x38 mm, 330x190x38 mm ou 100x190x38 mm
2. Supports pour cassette
3. Unité de stockage USB
4. Déminéralisateur DS200 pour le raccordement à une arrivée et à une évacuation d'eau
5. Support pour sachets (afin de faciliter le séchage des articles) / Poignée du plateau

6. Cassette dentaire, complète avec couvercle et mécanisme de fixation, 287x186x39 mm
7. Imprimante

Il existe de nombreux autres accessoires pour les stérilisateur Getinge de la gamme K. Consultez la brochure séparée. Consultez le site www.skarhamn.getinge.com ou demandez des informations à votre revendeur Getinge le plus proche.



Getinge fournit des solutions complètes pour le nettoyage, la désinfection, la stérilisation, le confinement et le remplissage aseptique dans les secteurs de la santé et des sciences de la vie. Notre savoir-faire comprend tout, depuis la planification architecturale, les équipements de manutention et de production jusqu'aux systèmes de traçabilité des produits stériles. Notre engagement couvre l'expertise, la formation et le service après-vente pour toute la durée de vie de l'installation.

Agent commercial pour la France (marché dentaire)

E.U.R.L J. J. Saint Jalmes
28 Bd Auguste Pageot 44000 NANTES
Téléphone 02 51 83 64 68
Fax 02 51 83 64 69

GETINGE

Distribué par
ALPHACOMED
ZI ATHELIA II
145 Impasse du Serpolet, 13704 LA CIOTAT, France
Téléphone +33 442 73 10 89
Fax +33 442 73 10 03
info@alphacomed.com www.alphacomed.com

GETINGE

GETINGE GROUP est le leader mondial sur le marché des équipements et des systèmes contribuant à valoriser la qualité et la rentabilité au sein des soins de santé. Les équipements, les services et les technologies sont proposés sous les marques **ArjoHuntleigh** pour tout ce qui concerne l'hygiène, la manutention des patients, les soins des plaies, les lits médicaux, la prévention des thromboses veineuses profondes, les systèmes anti-escarres et le matériel de diagnostic, **GETINGE** pour tout ce qui concerne la lutte et la prévention des infections au sein des établissements de santé, et **MAQUET** pour tout ce qui concerne les installations de bloc opératoire, les soins cardio-pulmonaires et les soins intensifs.